



مرکز آموزشی درمانی نمازی

فلوجارت فرایند ارتقاء یافته

| | | |
|------------------------------|--|--|
| کد فرایند: IC-PC-01 | نمازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرکز آموزشی درمانی نمازی | شناسنامه فرآیندهای بیمارستانی عنوان فرایند: شستشو و ضد عفونی تیغه های لارنگوسکوپ |
| تاریخ آخرین بازبینی: ۹۵/۱۲/۹ | | |

آلوده شدن تیغه لارنگوسکوپ

پوشیدن وسایل حفاظت فردی توسط بیماریار(کمک بهیار و در صورت نبودن پرستار)

آیا تیغه لارنگوسکوپ دارای لامپ قابل جدا شدن است؟

جدا سازی لامپ تیغه لارنگوسکوپ

شستشوی تیغه لارنگوسکوپ با استفاده از برس ، با آب و صابون

خشک نمودن تیغه شستشو شده با آب و صابون

آیا ظرف مخصوص غوطه ورسازی سایدکس در بخش موجود است؟

تهیه ظرف مخصوص سایدکس از انبار

غوطه ورسازی تیغه لارنگوسکوپ در محلول گلوتر آلدهید ۲% (سایدکس) دارای تاریخ تولید و تاریخ انقضا با حجم کافی به مدت ۲۰ دقیقه

آب کشی نمودن تیغه لارنگوسکوپ بعد از گذشت ۲۰ دقیقه

خشک نمودن تیغه لارنگوسکوپ و آغشته نمودن تیغه به الکل ۷۰%

کاور نمودن تیغه لارنگوسکوپ با گاز استریل و قرار دادن آن در جعبه مخصوص

زمان انجام فرایند: ۲۵ دقیقه